



## UNIUM™ de Synthes La evolución del Colibri II

El sistema de herramienta eléctrica para uso en traumatología



Artículo No: 05.001.601

### Más fuerte, más ligero y más versátil

- +18% Potencia aumentada para procedimientos exigentes con una relación par/velocidad mejorada.
- -19% Peso más bajo para más comodidad y equilibrio.

### Gatillos centrados

Los gatillos centrados brindan respuesta táctil y control de velocidad.

### Indicador de nivel de batería

Conoce en todo momento de cuanto tiempo de trabajo dispone.

### Acoplamiento rápido de acero inoxidable

Para mayor durabilidad. Compatible con todos los accesorios y herramientas Colibri II / SBD II.

### Interruptor de modo de un dedo

Para cambiar sin esfuerzo entre los modos de apagado, encendido y solo hacia adelante.



## Compatible con todos los acoples y cargador de Colibri II

### Eficiencia

El poder de uno, simplicidad y rentabilidad:

- Una herramienta eléctrica para todas las aplicaciones principales de traumatismos y huesos pequeños.
- Una unidad de potencia acciona ambas piezas de mano.
- Un juego de herramientas de corte, accesorios y un cargador compatibles con versiones anteriores.

### Fiabilidad

Mayor vida útil para reducir el costo de reparación y desperdicio:

- Electrónica protegida contra el reprocesamiento.
- Tecnología de energía de batería de iones de litio de larga duración.
- Motor sin escobillas potente y duradero.
- materiales de alta calidad.
- Opciones de fijación del sistema UNIUM.

### Ergonomía

Comodidad y control mejorados:

- Interfaces de usuario intuitivas, configuración rápida.
- Diseño compacto: menor peso y tamaño reducido.
- +18 % de potencia para procedimientos exigentes.
- Ajuste equilibrado y natural en la mano.
- Pieza de mano UNIUM.

# El pack más completo con el que explotar el tremendo potencial de UNIUM™

Synthes Unium™ (Pack completo)



Artículo No: PACK-UNIUM-2B

Synthes Unium™ Power Unit: Batería



Artículo No: 05.001.602

Adaptador para cargador de batería UBC II



Artículo No: 05.001.604

Synthes Cargador de batería universal II



Artículo No: 05.001.204

Anclaje rápido agujas Kirschner



Artículo No: 532.022

Adaptador de sierra oscilante



Artículo No: 532.021

Mandril de tres mordazas, con llave



Artículo No: 05.001.253

Mandril de acoplamiento rápido AO/ASIF



Artículo No: 05.001.250

## Adaptador de Sierra Oscilante Synthes



### Colocación del adaptador de sierra:

El adaptador se puede bloquear en ocho posiciones diferentes (pasos de 45°) al encajarse: Bloquee el aparato, mueva el casquillo desplazable hacia el anclaje de la hoja de sierra y gire el adaptador hasta la posición deseada.

### Colocación de la hoja de sierra:

La hoja de sierra se puede ajustar en la posición deseada vertical y horizontalmente en ángulos de 45° (ver apartado previo "Colocación del adaptador de sierra" y "Cambio de la hoja de sierra").



### Para Synthes Colibri II y Unium: Diente fino



Artículo No.	Longitud útil	Longitud de hoja	Espesor de corte	Imagen	Artículo No.	Longitud útil	Longitud de hoja	Espesor de corte	Imagen
532.041	15.0 mm	6.0 mm	0.4 mm		532.045	22.0 mm	8.0 mm	0.4 mm	
532.042	15.0 mm	10.0 mm	0.4 mm		532.046	22.0 mm	12.0 mm	0.4 mm	
532.043	15.0 mm	16.0 mm	0.4 mm		532.047	31.0 mm	6.0 mm	0.4 mm	
532.044	18.0 mm	4.0 mm	0.4 mm		532.048	31.0 mm	10.0 mm	0.4 mm	

### Para Synthes Colibri II y Unium: Diente grueso



Artículo No.	Longitud útil	Longitud de hoja	Espesor de corte	Imagen	Artículo No.	Longitud útil	Longitud de hoja	Espesor de corte	Imagen
532.061	27.0 mm	6.0 mm	0.6 mm		532.065	50.0 mm	14.0 mm	0.6 mm	
532.062	27.0 mm	10.0 mm	0.6 mm		532.066	50.0 mm	20.0 mm	0.6 mm	
532.063	27.0 mm	14.0 mm	0.6 mm		532.067	50.0 mm	27.0 mm	0.6 mm	
532.064	50.0 mm	10.0 mm	0.6 mm		519.970	Lubricante especial Synthes: 40 ml			

## Adaptador de sierra oscilante grande TPLO de Synthes:

Accesorio de sierra oscilante grande (532.026), 17 000 osc./min

El accesorio de sierra oscilante grande está diseñado para realizar un corte de sierra en media luna.

### Inserción de la hoja de sierra:

Inserte la hoja de sierra en el acoplamiento de la hoja de sierra y apriete el tornillo de la hoja de sierra con la llave, que se suministró con el adaptador o utilice un destornillador StarDrive T15.

### Montaje del accesorio de sierra:

Asegúrese de que el manguito de bloqueo del accesorio de la sierra esté en la posición de desbloqueo. Inserte el accesorio de sierra en cualquier posición en el acoplamiento hasta que encaje en su lugar. Para evitar vibraciones durante el funcionamiento y aumentar la capacidad de aserrado, se requiere un ajuste manual adicional del accesorio en la pieza de mano. Para lograrlo, gire el manguito de bloqueo a la posición de bloqueo hasta que sienta que las clavijas de acoplamiento encajan en la pieza de mano (aprox. media vuelta).



## Hojas de sierra sagitales

Para Synthes Colibri II y Unium:



Artículo No.	Longitud útil	Longitud de hoja	Espesor de corte	Imagen	Artículo No.	Longitud útil	Longitud de hoja	Espesor de corte	Imagen
03.000.390	12.0 mm	45.0 mm	0.6 mm		03.000.394	24.0 mm	45.0 mm	0.6 mm	
03.000.391	15.0 mm	45.0 mm	0.6 mm		03.000.395	27.0 mm	50.0 mm	0.6 mm	
03.000.392	18.0 mm	45.0 mm	0.6 mm		03.000.396	30.0 mm	50.0 mm	0.6 mm	
03.000.393	21.0 mm	45.0 mm	0.6 mm						